


VENOTEKS®

T H E R A P Y

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY для верхних конечностей (рукава, перчатки) - современное и эффективное средство для профилактики и лечения лимфатических отеков верхних конечностей.

Применение госпитального трикотажа обеспечивает «выдавливание» интерстициальной жидкости из мягких тканей руки обратно в сосудистое русло, ускорение венозного кровотока по направлению к сердцу за счет градуированного давления (компрессии) 26-32 мм рт. ст. на мягкие ткани и стенки вен рук.

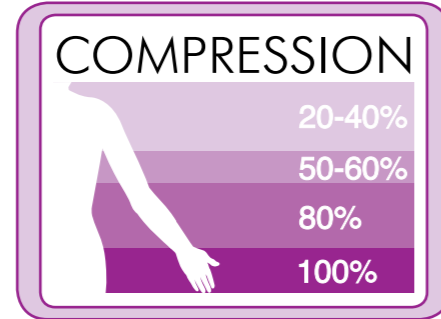


ПОДБОР РАЗМЕРОВ

Измерения проводят при выпрямленной руке. Окружности руки следует измерять от уровня ладони (А) до уровня G, расположенного на 3 см ниже подмышки. При измерении окружностей следите за тем, чтобы измерительная лента плотно прилегала к коже руки, но не врезалась в нее. Для подбора размера перчатки достаточно произвести измерения А и С.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ (РАЗМЕРЫ В СМ)

Размер	Small	Medium	Large	X-Large
G – окружность на уровне подмышечной складки	27–31	31–35	35–40	40–45
E – окружность на уровне локтя	24–27	27–31	31–35,5	35,5–41
C – окружность на уровне запястья	15–17	17–19,5	19,5–22,5	22,5–26
A – окружность ладони в самой широкой части	17,5–19,5	19,5–22	22–25	25–28

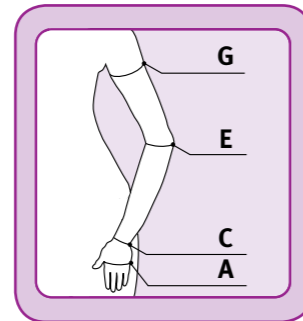

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая лечебная эффективность благодаря оптимальному рабочему давлению.
- Надежная фиксация рукавов без скручивания, соскальзывания и образования складок в результате сочетания состава и технологии плетения нити.
- Отсутствие швов предотвращает травмирование кожи.
- «Дышащая» ткань обеспечивает максимальный комфорт для кожи.
- Износостойкость материала обеспечивает длительный срок службы.
- Гипоаллергенность компрессионного трикотажа обеспечивается использованием технологий производства изделий без латекса и хлорсодержащих компонентов.

Гарантия качества госпитального трикотажа VENOTEKS THERAPY обеспечивается производством в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2008.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Рукава и перчатки VENOTEKS THERAPY нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.
- Недопустимо использование стиральных порошков, химических растворителей и пятновыводителей.
- Стирка и выжимание изделий в стиральных машинах любого типа запрещены.
- Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

VENOTEKS®

T H E R A P Y

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Первичная лимфедема — врожденные аномалии развития лимфатической системы (синдром Ноне-Милроя-Мейжа, юношеская лимфедема и т.д.).

Вторичная лимфедема

- Состояние после мастэктомии и лучевой терапии.
- Состояние после травм, операций и ожогов с повреждением лимфатических сосудов.
- Осложнение рожистого воспаления дермы и подкожной клетчатки.
- Осложнение при длительном ограничении подвижности конечностей после гипсовой иммобилизации, при парезах и плегиях. Тромбофлебиты вен плеча и предплечья (включая постинъекционные осложнения).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компрессионный трикотаж следует применять с разрешения лечащего врача в следующих случаях: дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения рук (эндартериит, атеросклероз, диабет), мокнущие экземы, острая инфекция мягких тканей руки, инфицированные трофические язвы, метаболические отеки, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компрессионное изделие, инструкция.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация с бытовым мусором.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев со дня продажи на сохранение компрессионных свойств.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

СРОК СЛУЖБЫ

Не определен и зависит от интенсивности эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием.

Изготовитель

Elastic Therapy, Inc.
(Эластик Терапи, Инк.) 718,
Индастриал Парк Авеню Эшборо,
27204, штат Северная Каролина, США



Сертификат качества ISO 9001-2008

Импортер

000 «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Для корреспонденции

Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Сертификат соответствия
№ РОСС US. ИМ24. В04949 от 03.11.2010
Выдан ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ»
РУ № ФСЗ 2010/08201 от 01.11.2010

Выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки.

Индивидуальные параметры покупателя

К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.

Дата покупки

ВНИМАНИЕ!

Для рассмотрения претензий к приобретенным изделиям вам необходимо предоставить по месту покупки:

- 1) изделие в чистом виде;
- 2) оригинал кассового чека;
- 3) данную упаковку изделия.

Подпись покупателя



ваша победа над варикозом

VENOTEKS®

T H E R A P Y

Медицинские компрессионные противоотечные рукава
26 - 32
мм рт. ст.

hospital
lymphedema

Арт.: TVHLE1-N4_05/12

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY для верхних конечностей нужно использовать постоянно и снимать его только для проведения гигиенических процедур, или применять в промежутках между курсами терапии и во время лечебной физкультуры, если врач не рекомендовал иной режим применения трикотажа. Для облегчения надевания рукава рекомендуется припудрить кожу руки тальком или детской присыпкой. Для правильного распределения давления рукав должен быть равномерно надет на всю руку.

Следует обязательно расправить складки, чтобы избежать трения и раздражения кожи. Запрещается закатывать края рукава валиком, это может вызвать «эффект эластичного жгута», что повлечет накопление лимфы и венозной крови ниже перетяжки.

Правильно подобранный по размеру рукав плотно прилегает к телу, но не нарушает кровообращения в кисти и не вызывает болезненных ощущений.

Рукав, свободно надетый на руку, не оказывает терапевтического воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Острые ногти, мозоли, заусенцы могут повредить изделие, поэтому кожа и ногти на руках должны быть предварительно обработаны.
- Края колец, браслетов и других украшений на руках могут испортить изделие, поэтому их перед надеванием и стиркой трикотажа нужно снимать.
- Сняв рукав, нужно вымыть кожу по всей длине руки и, по возможности, нанести увлажняющий крем или детскую присыпку.
- Если во время ношения изделия беспокоит боль, отек, ощущение онемения или изменение цвета кисти, следует обратиться к лечащему врачу.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

1. Выверните половину рукава наизнанку.
2. Наденьте рукав на запястье и предплечье.
3. Держитесь кистью за опору (дверная ручка и т.п.), расслабьте мышцы руки и другой рукой натягивайте постепенно рукав до подмышки.
4. Убедитесь в том, что рукав плотно, равномерно сидит на руке и не стесняет ее сгибание в локте. Следите за тем, чтобы у подмышки рукав не сворачивался валиком.
5. Застегните ленту рукава, если она предусмотрена в изделии.
6. Если вы надеваете перчатку и рукав вместе, убедитесь, что их края не стыкуются в области лучезапястной складки и одно изделие не перекрывает другое.

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ ГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ VENOTEKS THERAPY ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Удалите с рук все украшения.

Расстегните плечевой ремень (ленту).

Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к кисти.

Сначала снимите изделие с большого пальца руки и далее все изделие с кисти.

ПРАВИЛА УХОДА

- Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY для верхних конечностей рекомендуется ежедневно стирать вручную.
- Температура воды не должна превышать 40°C. В качестве моющих средств нужно выбирать жидкие слабощелочные шампуни.
- После стирки изделие хорошо прополоскать в теплой воде, завернуть в полотенце, слегка отжать и просушить в прохладном месте на сухом полотенце.

