

## Особенности госпитальных чулок HOSPITAL PRO23

Состав и технология изготовления изделия гарантируют комфорт и удобство в эксплуатации:

- Эластичная вязка полотна обеспечивает удобство при надевании даже в послеоперационный период.
- Силиконовая резинка обеспечивает надежную фиксацию на бедре.
- Цветовая кодировка в виде полоски, расположенной ниже резинки, позволяет сократить время подбора размера.
- Открытый мыс обеспечивает удобство надевания, что особенно актуально при ограниченной подвижности пациентов, при оценке периферической гемодинамики стоп, в ситуациях, требующих ухода за передним отделом стопы.
- Технология вязки манжеты в области пальцев обеспечивает комфортное прилегание к стопе, не пережимая и не сдавливая ее.
- Возможность как ручной, так и машинной стирки и стерилизации обеспечивает безопасность многократного использования.

## Лечебные свойства

1. Госпитальные чулки HOSPITAL PRO23 – незаменимое средство для компрессионной терапии после процедуры флебосклерозирования и после оперативных вмешательств на венах нижних конечностей. Применение трикотажа обеспечивает опосредованное сдавливание просвета вен за счет компрессии на мягкие ткани нижних конечностей. Это способствует остановке кровотечения в зоне разрушения вены, предотвращает образование гематом, снижает интенсивность болевого синдрома, ускоряет процесс окклюзии склерозированных вен. Также PRO23 восстанавливает нормальный кровоток неоперированных вен, уменьшает отеки нижних конечностей и способствует профилактике образования венозных тромбозов.
2. Госпитальные чулки HOSPITAL PRO23 – эффективное средство комплексной профилактики образования венозных тромбов у пациентов с умеренной и высокой степенью риска. Применение этого трикотажа обеспечивает сужение вен за счет компрессии тканей нижних конечностей. Как следствие – восстановление работы клапанов вен нижних конечностей, ускорение венозного кровотока, уменьшение вязкости крови и уменьшение риска образования венозных тромбов.


**Градуированная компрессия (23 мм рт.ст.) – физиологически распределенное давление по ноге, максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся к бедру, которое задается компьютером при изготовлении трикотажа VENOTEKS HOSPITAL.**

## Правила подбора размера:

Обратите внимание!

Измерения нужно проводить утром до появления отеков на ногах или днем после обязательного отдыха в течение 15 минут с приподнятыми ногами. В случае применения госпитальных чулок HOSPITAL PRO23 после проведения операций на нижних конечностях, замеры необходимо проводить ДО операции.

Компрессия: максимальная компрессия в области лодыжек – 23 мм рт.ст.

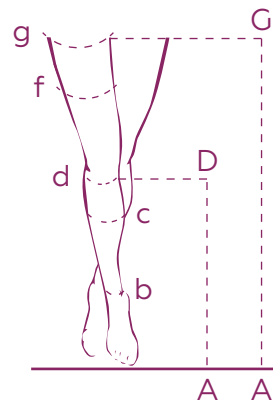

**b** – окружность лодыжки  
**d** – окружность на 2 см ниже коленной чашечки  
**f** – окружность бедра на 13 см ниже ягодичной складки  
**g** – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки  
**A-D** – длина от уровня d до пятки  
**A-G** – длина от уровня g до пятки

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Измерение окружности (см)						
b	18-20	20-23	23-26	26-28	28-30	30-32
d	25-34	28-36	31-39	33-41	36-46	40-48
f	37-49	41-53	45-57	49-60	53-65	59-70
g	40-54	44-58	48-62	52-65	56-70	62-75
Измерение длины (см)						
A-D	до 37	до 40	до 44	до 48	до 48	до 48
A-G	до 70	до 75	до 80	до 80	до 85	до 85
цветовая кодировка размера (под резинкой)	коричневый	красный	синий	желтый	розовый	зеленый

Артикул	2R236
Состав	77% – нейлон, 23% – эластан

# VENOTEKS®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL

HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL

## Госпитальные чулки HOSPITAL PRO23

\* незаменимы для компрессионного лечения после операций на венах нижних конечностей и флебосклерозирования, а также для профилактики венозных тромбозов у пациентов с умеренной и высокой степенью риска.

- физиологически распределенная градуированная компрессия
- цветовая кодировка размеров под резинкой
- температурный и водный баланс кожи
- гипоаллергенные материалы LatexFree
- открытый мыс для гигиены пальцев ног и контроля микроциркуляции

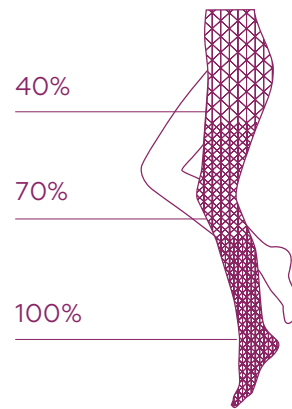

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- после флебосклерозирования;
- после оперативных вмешательств на венах нижних конечностей;
- для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов с умеренной и высокой степенью риска ВТЭО.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Потсдаммер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия. По вопросам и предложениям обращаться: ООО «ОртоМедикл Групп», Россия, 127220, Москва, а/я №58, тел. +7 (499)257-45-81, e-mail: skk@nikamed.ru.

Система менеджмента качества ISO 13485

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

РУ № ФСЗ 2012/13480 от 26.12.2012 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д71997 (с 23.12.2015 г. по 23.12.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Гарантийный срок:** на компрессионные свойства – 1 месяц при условии соблюдения правил ухода. Соблюдение мер безопасности не требуется.

\*Более подробная информация в инструкции по применению.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

# VENOTEKS®

## ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЧУЛКИ HOSPITAL PRO 23



дышащий материал, комфортно носить

быстро и удобно надевать и снимать

можно стерилизовать и использовать многократно

оказывают градуированную компрессию

Арт.: TVH2-4-N1\_02/16



**Обязательно проинформируйте своего лечащего врача, если у Вас:**

дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения ног (эндартериит, атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мокнущие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги, инфицированные трофические язвы, язвы не венозного происхождения, метаболические отеки, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.

**Режим и правила использования госпитальных чулок HOSPITAL PRO23**

Режим ношения (длительность и непрерывность) послеоперационных чулок PRO23 определяет специалист. Надевать компрессионный послеоперационный трикотаж следует по возможности утром или после 10-15-минутного отдыха ног на возвышении для предупреждения образования отеков. Пациентам с высоким риском ВТЭО, находящимся на длительном постельном режиме, трикотаж необходимо использовать в дневные и ночные часы и снимать его только для проведения гигиенических процедур, если иное не рекомендовал специалист.

**Обратите внимание!**

- Острые ногти, мозоли, заусенцы на пальцах могут повредить чулки, поэтому нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей кистей и стоп.
- Перед надеванием и стиркой чулок нужно снимать кольца, браслеты и другие украшения на руках, которые могут повредить изделие.
- Рекомендуется надевать чулки в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.

**Как правильно снимать изделия HOSPITAL PRO23**

- Удалите с рук все украшения и наденьте резиновые перчатки.
- Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе.
- Аккуратно снимите пятку и далее все изделие.

**Правила ухода:**

Изделие рекомендуется стирать через день вручную или в стиральной машине при температуре 90°С (не более 15 стирок), можно подвергать стерилизации методом автоклавирования при 121°С (не более 3 раз).

Ручная стирка: используйте средства для стирки деликатных тканей. Тщательно прополощите. Не выкручивайте. Сушите при комнатной температуре.

Машинная стирка: максимальная температура 90°С с использованием нейтральных моющих средств. Стирайте в защитном мешочке для белья. Барабанная сушка при температуре не выше 55°С.



**Правила хранения:**

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухом месте, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

**Обратите внимание!**

Запрещены: отбеливание, химчистка, утюжка, сушка на нагревательных приборах. Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

**Гарантийными случаями не являются:**

- Механические повреждения (включая случайные).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**Информация для покупателей:**

Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки.

Индивидуальные параметры покупателя:

К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.

Подпись покупателя

Дата покупки

**Внимание!**

Для рассмотрения претензий к приобретенным изделиям Вам необходимо предоставить по месту покупки изделие в чистом виде, оригинал кассового чека, данную упаковку изделия.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

**Срок годности не установлен.** По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

**Комплектность:** компрессионное изделие, инструкция.