

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки _____ Подпись покупателя _____

Обязательно укажите размеры потребителя.

1. Размер стопы /обуви (см) _____
2. Окружность надлодыжечной области (см) _____
3. Окружность икры (см) _____
4. Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки _____
5. Окружность талии (для колгот) (см) _____
6. Длина: А-Д (гольфы) (см) _____
А-Г (чулки, колготы) (см) _____
7. Окружность бедер _____

Информация для покупателей:

Изделия чулочно-носочные надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.98.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока принимаются при возврате изделия в упаковке производителя.

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485

Изготовитель:

Рехард Технолоджис ГмбХ,
Потсдамер штрассе, 92, Д-10785, Берлин, Германия.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД»
по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2,
телефон: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13480 от 26.12.2012 г. выдано
ФС по надзору в сфере здравоохранения, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.D01342 (с 27.12.2012 г.
по 26.12.2015 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ
ВНИИНМАШ».

Арт.: INTVK-LT-RT-N1_08/15

MEDICAL COMPRESSION KNEE-HIGHS,
STOCKINGS AND PANTY HOSES
Putting on, washing, care and maintenance instruction

МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ГОЛЬФЫ,
ЧУЛКИ И КОЛГОТЫ

Инструкция по применению и уходу за изделиями



ваша победа над варикозом

VENOTEKS®

T H E R A P Y




Зарегистрировано в ФС по надзору
в сфере здравоохранения
и социального развития

www.nikamed.ru

Лечебные свойства VENOTEKS THERAPY

Уникальные лечебные свойства VENOTEKS THERAPY основаны на том, что каждое изделие равномерно по всей окружности ноги оказывает давление (компрессию) на мягкие ткани и далее на стенки вен. Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии их изготовления. Наиболее существенным отличием VENOTEKS THERAPY от любого поддерживающего трикотажа является то, что компрессия физиологически распределена по ноге (лодыжка 100%, голень 80%, колено 50-60%, бедро 20-40%). Воздействие медицинского компрессионного трикотажа нормализует работу естественного мышечно-венозного «насоса» ног. Давление трикотажа на вены сужает их просвет, поддерживает клапаны вен, увеличивает скорость возврата венозной крови к сердцу, предотвращает обратный ток крови по венам и препятствует образованию

тромбов. Дозированное давление трикотажа VENOTEKS THERAPY освобождает мягкие ткани ног от отеков, не оставляя места для скопления жидкости. Поэтому проходит усталость и боли в мышцах. Гольфы, чулки и колготы создают дополнительный каркас, поддерживающий вены, и защищают их от чрезмерного растяжения постоянным давлением крови. Компрессионные свойства трикотажа VENOTEKS THERAPY подтверждены клиническими исследованиями и гарантированно сохраняются 6 месяцев при соблюдении инструкции по применению и уходу.

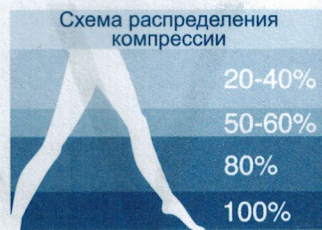

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

VENOTEKS THERAPY Clinic 1 18-21 мм рт. ст.

Показания к применению:

- Наследственная предрасположенность к варикозной болезни.
- Начальная форма хронической венозной недостаточности, когда при отсутствии внешних признаков варикозного расширения вен появляются отеки и тяжесть в ногах к вечеру (след от резинки носков).
- Синдром «тяжелых ног»: тяжесть, боль, судороги, чувство онемения, «мурашек» и распирания в ногах к вечеру.

- Ретикулярный варикоз в виде выраженного сосудистого рисунка на коже ног.
- Наличие телеангиоэктазий (сосудистые «звездочки») на коже ног.
- Профилактика варикоза и улучшение плацентарного кровообращения у беременных.

VENOTEKS THERAPY Clinic 2 23-32 мм рт. ст.

Показания к применению:

- Хроническая венозная недостаточность (ХВН) с расширенными поверхностными венами.
- Наличие невоспаленных уплотнений и варикозных узлов на венах.
- Сильные отеки ног, не проходящие к утру.
- Множественные сосудистые звездочки или выраженная венозная сетка, занимающая площадь более 1/3 голени или бедра.
- Острый тромбоз глубоких вен.
- Посттромбофлебитическая болезнь, в том числе у беременных.
- Отеки ног и любые признаки ХВН

на фоне беременности и в послеродовом периоде.

- Подготовка к оперативному вмешательству на венах нижних конечностей.
- Состояние после склеротерапии и удаления вен.
- Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска.

Обратите внимание!

Применение трикотажа II класса компрессии требует консультации врача.

VENOTEKS THERAPY Clinic 3 34-46 мм рт. ст.

Показания к применению:

- Выраженная и осложненная хроническая венозная недостаточность (ХВН).
- Сильные отеки на ногах в сочетании с варикозными узлами и наличием уплотнений по ходу вен.
- Тромбоз глубоких вен.
- Хронический тромбоз поверхностных вен.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Наличие участков пигментации по ходу вен на голени или бедрах.
- Начальные проявления лимфопаростазов.

- Трофические язвы вне обострения.
- Наличие артерио-венозных шунтов (синдром Паркс-Вебера). Врожденное недоразвитие клапанов глубоких вен нижних конечностей (синдром Клиппель-Треноне).

Обратите внимание!

Применение трикотажа III класса компрессии требует консультации врача.

Противопоказания к применению VENOTEKS THERAPY

- Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность.
- Диабетическая полинейропатия и ангиопатия.
- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом или тромбозом болей) (лодыжечно-плечевой индекс <0,7. При снижении давления на уровне лодыжки ниже 100 мм рт.ст. (но выше 60 мм рт.ст.) могут быть ис-

- пользованы изделия I класса компрессии).
- Трофические язвы не венозной этиологии.
- Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флегмон.
- Местные кожные заболевания ног.
- Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа.
- Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).

Показания к применению:

Трофические язвы нижних конечностей венозной этиологии.

Противопоказания:

- Обильное отделяемое или обширная площадь раневой поверхности.
- Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность.
- Диабетическая полинейропатия и ангиопатия.
- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом или тромбозом болей) (лодыжечно-плечевой индекс <0,7).

- Трофические язвы не венозной этиологии.
- Острая инфекция мягких тканей.
- Местные кожные заболевания.
- Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа.
- Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).

Обратите внимание!


Применение трикотажа III класса компрессии требует консультации врача.

Правила подбора размера VENOTEKS THERAPY

Обратите внимание!

При подборе размера гольфов, чулок и колгот руководствуйтесь приведенными здесь таблицами. Измерения нужно проводить утром, до появления отеков на ногах.

- Т – окружность талии
Н – окружность бедер
g – окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)
d – окружность под коленной чашечкой (на два пальца ниже коленного сустава)
c – окружность икры
b – окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)
a – размер стопы (обуви)
A-D – длина от уровня d до пятки
A-G – длина от уровня g до пятки

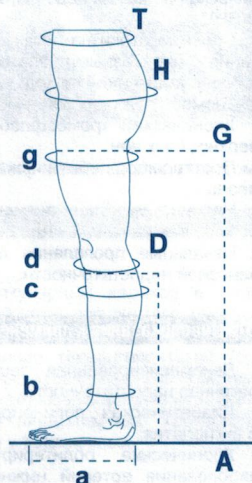

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

По ГОСТ Р 51219-98: 1 класс компрессии от 6 до 14 мм рт.ст.; 2 класс компрессии от 14 до 24 мм рт.ст.; 3 класс компрессии от 24 до 40 мм рт.ст.; 4 класс компрессии от 40 до 65 мм рт.ст.

ПЛОТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АТИКУЛ: 1C116 (размеры в см)

Измерение	Размер стопы (обуви)	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)	Длина от пола до уровня g	Окружность бедер (для колгот)	Окружность талии (для колгот)
Размер	a	b	c	g	A-D (для гольфов)	A-G	H	T
S	34-36	18-20	26,5-37	40,5-56	до 40,5	до 73,5	до 102	до 72
M	36-38	20-24	29-39	44,5-61	до 43	до 76	до 112	до 85
L	38-41	24-28	32-43	50-66	до 46	до 79	до 122	до 95
XL	от 41	28-32	34-46	56-71	до 48	до 81	до 132	до 100
XXL	от 41	32-34	37-51	66-81	до 48	до 84	до 140	до 110
XXXL	от 41	34-37	47-58,5	75-89	до 48	до 84	до 150	до 120

ГОЛЬФЫ МУЖСКИЕ 1-Й КЛАСС КОМПРЕССИИ

АТИКУЛ: 1C112 (размеры в см)

Измерение	Размер стопы (обуви)	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)
Размер	a	b	c	A-D
S	37-39	18-21	28-38	от 28 до 58
M	39-42	21-25	30-42	
L	42-45	25-29	32-46	
XL	от 45	29-33	34-50	

ПЛОТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АТИКУЛЫ: 2C133, 2C146 (размеры в см)

Измерение	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)	Длина от пола до уровня g	Окружность бедер (для колгот)	Окружность талии (для колгот)
Размер	b	c	g	A-D (для гольфов)	A-G	H	T
S	18-20	26,5-37	40,5-56	до 40,5	до 73,5	до 102	до 72
M	20-24	29-39	44,5-61	до 43	до 76	до 112	до 85
L	24-28	32-43	50-66	до 46	до 79	до 122	до 95
XL	28-32	34-46	56-71	до 48	до 81	до 132	до 100
XXL	32-34	37-51	66-81	до 48	до 84	до 140	до 110

ПЛОТНЫЕ МУЖСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Артикулы: 2C112, 2C144 (размеры в см)

Измерение	Размер стопы (обуви)	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)
Размер	a	b	c	A-D
S	37–39	18–21	28–38	от 28 до 58
M	39–42	21–25	30–43	
L	42–45	25–29	32–47	
XL	от 45	29–33	34–51	

ПЛОТНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Артикулы: 2C114, 2C113, 2C213, 2C316, 2C314, 2C214, 2C414 (размеры в см)

Измерение	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)	Длина от пола до уровня g	Окружность бедер (для арт. 203)	Окружность талии (для арт. 203)
Размер	b	c	g	A-D (для гольфов)	A-G (для чулок)	H	T
S	18–20	26,5–37	40,5–56	до 40,5	до 73,5	до 102	до 72
M	20–24	29–39	44,5–61	до 43	до 76	до 112	до 85
L	24–28	32–43	50–66	до 46	до 79	до 122	до 95
XL	28–32	34–46	56–71	до 48	до 81	до 132	до 100
XXL*	32–34	37–51	66–81	до 48	до 84	до 140	до 110
XXXL**	34–37	47–58,5	75–89	до 48	до 84	до 150	до 120

* Доступен только для артикулов 2C114, 2C316, 2C314

** Доступен только для артикулов 2C114, 2C316

МОНОЧУЛОК

Артикул: 2C218 (размеры в см)

Измерение	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до уровня g
Размер	b	c	g	A-G
S	18–21	28–38	40–62	от 57 до 83
M	21–25	30–42	46–70	
L	25–29	32–46	54–78	
XL	29–33	34–50	60–81	

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТЫ ВЕРСИИ SHORT

Артикулы: 2C316, 2C334 (размеры в см)

Измерение	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до уровня g	Окружность бедер	Окружность талии
Размер	b	c	g	A-G	H	T
S	18–20	26,5–37	40,5–56	до 66	до 102	до 72
M	20–24	29–39	44,5–61	до 71	до 112	до 85
L	24–28	32–43	50–66	до 73,5	до 122	до 95
XL	28–32	34–46	56–71	до 76,25	до 132	до 100
XXL	32–34	37–51	66–81	до 78,75	до 140	до 110
XXXL*	34–37	47–58,5	75–89	до 78,75	до 150	до 120

* Доступен только для артикула 2C316

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА РАЗМЕРОВ ГОЛЬФОВ, ЧУЛОК И КОЛГОТ 3-ГО КЛАССА КОМПРЕССИИ VENOTEKS THERAPY CLINIC 3

Артикулы: 3C114, 3C113, 3C314, 3C213, 3C313, 3C214 (размеры в см)

Измерение	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)	Длина от пола до уровня g	Окружность бедер (для колгот)	Окружность талии (для колгот)
Размер	b	c	g	A-D (для гольфов)	A-G	H	T
S	18–20	26,5–37	40,5–56	до 40,5	до 73,5	до 102	до 72
M	20–24	29–39	44,5–61	до 43	до 76	до 112	до 85
L	24–28	32–43	50–66	до 46	до 79	до 122	до 95
XL	28–32	34–46	56–71	до 48	до 81	до 132	до 100

ПРОТИВОЯЗВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ VENOTEKS LEG ULCER HEAL

Артикул: 2W714 (размеры в см)

Измерение	Размер стопы (обуви) (гольфы)	Окружность надлодыжечной области	Окружность икры
Размер	a	b	c
S	35–39	18–21	30,5–37,5
M	39–42	21–25	33–40
L	42–45	25–29	35,5–43
XL	43–48	29–32	38–46
XXL	43–48	30–34	40–49

Состав изделий

Артикул	Состав
1C116, 1C112	90% нейлон, 10% эластан
2C112	85% нейлон, 15% эластан
2C144	80% нейлон, 10% эластан, 10% медь
2C146	85% нейлон, 10% эластан, 5% медь
2C133	60% нейлон, 10% эластан, 30% хлопок
2C334	85% нейлон, 15% эластан
2C114, 2C113	80% нейлон, 20% эластан
2C214, 2C213	75% нейлон, 25% эластан
2C316, 2C414	80% нейлон, 20% эластан
2C314, 2C218	80% нейлон, 20% эластан
3C114	75% нейлон, 25% эластан
3C113	75% нейлон, 25% эластан
3C214	75% нейлон, 25% эластан
3C213	75% нейлон, 25% эластан
3C314	75% нейлон, 25% эластан
3C313	75% нейлон, 25% эластан
2W714, лайнер	90% нейлон, 10% эластан
2W714, гольф	65% нейлон, 35% эластан

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ ТРИКОТАЖА VENOTEKS THERAPY

	ВИД ИЗДЕЛИЯ	Clinic 1	Clinic 2	Clinic 3
	Компрессия	18-21 мм рт.ст.	23-32 мм рт.ст.	34-46 мм рт.ст.
	Гольфы мужские	1C112	2C112 2C114 2C113 он 2C144	3C114 3C113 он
	Гольфы женские	1C116	2C133 он 2C114 2C113 он 2C146	3C114 3C113 он
	Чулки мужские		2C213 он 2C214	3C214 3C213 он
	Чуллок на одну ногу		2C218	
	Чулки женские		2C213 он 2C214	3C214 3C213 он
	Колготы мужские		2C314	
	Колготы женские		2C316 2C334	3C314 3C313 он
	Колготы для беременных		2C414	
	Противоязвенный комплект leg ulcer heal, арт. 2W714	Лайнер оказывает давление 10 мм рт.ст. на уровне лодыжки, а верхний гольф – 20-30 мм рт.ст. Суммарная компрессия комплекта составляет 30-40 мм рт.ст. (III класс компрессии)		

Цифро-буквенным кодом в таблице обозначены артикулы изделий, сокращения обозначают: он – открытый носок.

– при появлении товара в нашем ассортименте мы сообщим об этом дополнительно.


Как правильно надевать VENOTEKS THERAPY

Надевайте VENOTEKS THERAPY утром до появления отеков на ногах. Если Вы снимаете компрессионный трикотаж в течение дня, то надевать его нужно после 10-15 минутного отдыха ног в возвышенном положении. Для облегчения надевания изделия ноги нужно припудрить тальком или детской присыпкой. Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.

Обратите внимание!

- Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие. Их нужно снимать перед надеванием и стиркой компрессионных изделий.
- Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
- Для надевания изделий с открытым носком используйте специальный шелковый носочек.


Схема надевания

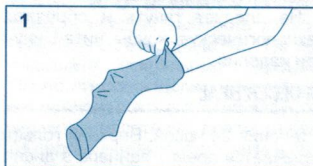


- Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног к надеванию изделия.
- Наденьте на ступню шелковый носочек (в моделях с открытым носком).
- Выверните изделие наизнанку до пятки.



- Осторожно натяните изделие на ступню и убедитесь, что пятка изделия правильно расположена на ноге.

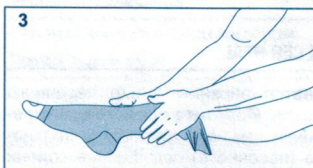

- Натягивайте изделие разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть изделие с усилием за верхний край.

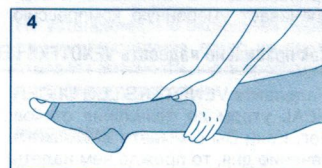

- Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине изделия.
- Если Вы надеваете колготы, натягиваете их далее на бедра.
- Вытяните шелковый носочек, используемый в моделях с открытым носком.

Как правильно снимать VENOTEKS THERAPY

Прежде чем снимать изделие, удалите с рук все украшения. Рекомендуется снимать изделие в резиновых перчатках.

Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе. Аккуратно снимите пятку и далее все изделие.

Как правильно ухаживать за VENOTEKS THERAPY

- VENOTEKS THERAPY нужно ежедневно стирать только вручную.
- Температура воды не должна превышать 40°C.
- В качестве моющих средств нужно выбирать жидкие слабощелочные шампуни.
- Не используйте стиральные порошки.
- После стирки изделие нужно хорошо прополоскать в теплой воде,

Обратите внимание!

- VENOTEKS THERAPY нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, гладить и сушить на батареех, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.
- Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей, которые повреждают изделие.

Инструкция по применению VENOTEKS LEG ULCER HEAL

Противоязвенный комплект VENOTEKS LEG ULCER HEAL состоит из верхнего гольфа (20-30 мм рт.ст. на уровне лодыжки) и двух нижних гольфов (лайнеров) белого цвета (10 мм рт.ст. на уровне лодыжки). Пара лайнеров позволяет ежедневно менять нижний гольф, прилегающий к коже ноги, и обеспечивает умеренную компрессию

Как правильно надевать VENOTEKS LEG ULCER HEAL

Надевайте VENOTEKS LEG ULCER HEAL утром до появления отеков ног. Если Вы снимаете комплект в течение дня, то прежде чем надеть его снова, надо поддержать ноги в приподнятом положении в течение 10-15 минут.

Раневую поверхность необходимо обработать перед надеванием и заклеить пластырем заранее. Не подкладывайте большое количество марли под пластырь на рану, поскольку для максимального эффекта необходимо плотное прилегание изделия к ноге на всех участках.

Первым надевается гольф белого цвета (лайнер). После этого наде-

вается верхний гольф песочного цвета. Обратите внимание, что резинки нижнего (белого) и верхнего (песочного) гольфов на голени должны быть совмещены, то есть резинка белого гольфа на голени должна быть под резинкой верхнего гольфа песочного цвета и при этом не выглядывать из-под него.

Для облегчения надевания изделия ноги нужно припудрить тальком или детской присыпкой. Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа необходимо ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.

выводителю, которые повреждают изделие.

- Стирка и выжимание изделий в стиральных машинах любого типа категорически запрещена.
- Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

в течение 24 часов. Верхний гольф надевается поверх лайнера в дневной период времени и используется во время двигательной активности, увеличивая суммарную компрессию до 30-40 мм рт.ст. Такое рабочее давление в течение дня является оптимальным для заживления трофических язв.

валяется верхний гольф песочного цвета. Обратите внимание, что резинки нижнего (белого) и верхнего (песочного) гольфов на голени должны быть совмещены, то есть резинка белого гольфа на голени должна быть под резинкой верхнего гольфа песочного цвета и при этом не выглядывать из-под него. Для облегчения надевания изделия ноги нужно припудрить тальком или детской присыпкой. Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа необходимо ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.

Обратите внимание!

Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить трикотаж. Их следует снимать перед надеванием и стиркой компрессионных изделий.

Как правильно ухаживать за VENOTEKS LEG ULCER HEAL

Лайнер белого цвета VENOTEKS LEG ULCER HEAL нужно стирать только вручную ежедневно.

В наборе два лайнера белого цвета, чтобы можно было их менять каждый день.

Гольф песочного цвета можно стирать 1 раз в 2 дня.

Температура воды не должна превышать 40°C. В качестве моющих средств следует выбирать жидкие слабощелочные средства. Не используйте стиральные порошки. После стирки изделие нужно хорошо прополоскать в теплой воде, вернуть в полотенце, слегка отжать не перекручивая и просушить в прохладном месте на сухом полотенце.

Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать гольфы и лучше разглаживать складки.

VENOTEKS LEG ULCER HEAL нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, гладить и сушить на батареех, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца. Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей, которые повреждают изделие. Стирка и выжимание изделий в стиральных машинах любого типа категорически запрещена. Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.



Комплектность

Компрессионное изделие, инструкция.

Условия утилизации

Утилизация с бытовым мусором.

Гарантийный срок

6 месяцев со дня продажи на сохранение компрессионных свойств.

Гарантийными случаями не являются

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Условия хранения

Изделия должны храниться при ком-

натной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок годности

Не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

ВНИМАНИЕ!

Перед применением компрессионного лечения необходимо получить разрешение лечащего врача в следующих случаях: дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения ног (энтертериит, атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мокнущие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги, в т.ч. рожистое воспаление, инфицированные трофические язвы, метаболические отеки, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.